


V Plzni dne 12.7.2023

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

**Dovolujeme si Vás informovat o dodávání nového odběrového nástroje** pro každý LBC odběr. Tento nástroj již v sobě kombinuje i centrální část pro lepší výtěžnost endocervikální komponenty a nahrazuje endobrush. Příkladáme zároveň i návod správné techniky odběru – **2x otočka o 360° ve směru hodinových ručiček**. Odběrový nástroj jsme ve spolupráci s několika gynekology již vyzkoušeli a osvědčil se. Tento kartáček bude nyní standardní součástí Vašich objednávek LBC sady. Pokud byste pro určité případy požadovali i původní odběrový kartáček (např. stenóza hrdla, gravidita, stp. HY apod.), lze ho doobjednat samostatně ve Vámi požadovaném počtu.

#### **MANUÁL nového LBC odběrového nástroje - CERVEX-BRUSH COMBI**

**Kontraindikace : neužívejte pro odběr cytologie v průběhu gravidity.**

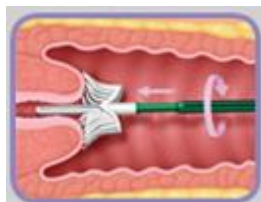

**Vlastní odběr:** kartáček má centrální část určenou k lepšímu odběru endocervikální komponenty, v případě potřeby lze použít přiměřené množství lubrikantu. Zaveďte centrální část do endocervikálního kanálu tak, aby okolní štětinky nástroje byly v plném kontaktu s povrchem ektocervixu. Jemně zatlačte a **otáčejte nástrojem ve směru hodinových ručiček 2x o 360°**



**Přenos do LBC odběrové nádoby:** Okamžitě po odběru vložte nástroj do lahvičky a **10x** zatlačte oproti dnu tak, aby se uvolnil materiál ze štětiněk. Následně **silně** zavřte s celým kartáčkem pro uvolnění veškerého odebraného buněčného materiálu. **Poté nástroj znehodnoťte, nenechávejte ho v odběrové nádobce.**

Věříme, že s novým odběrovým nástrojem budete spokojeni.

S úctou a pozdravem za tým gynekologické onkologické cytologie

**MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková**  
Vedoucí lékař úseku gynekologické cytologie.