

FIXACE CYTOLOGICKÉHO MATERIÁLU

K fixaci veškerého cytologického materiálu (neplatí pro fixaci moče) se používá

fixační roztok : **ETHANOL obecně denaturovaný
(EURODENATURACE)**

(lahev má šroubovací uzávěr označen červenou barvou)

Postup:

A. Materiál v tekuté formě

K odebrané tekutině přilít fixační roztok a promíchat/protřepat.

Množství fixační tekutiny, které přilijeme je asi $\frac{1}{4}$ objemu tekutého materiálu.

B. Nátěry

Pomocí rozprašovače opatrně nastříkáme tenkou souvislou vrstvu fixačního roztoku.

Roztok stříkáme ze vzdálenosti 20 – 30 cm.

POZNÁMKA: neplatí pro odběr na LBC