


Odběr materiálu na cytologické vyšetření do fixace ThinPrep CytoLyt Solution



Používají se originální nádoby s fixační tekutinou CytoLyt Solution.

1. nádobku označíme jménem a příjmením pacienta, event. napíšeme rok narození nebo rodné číslo
2. do takto označené nádoby přilijeme (k fixační tekutině) odebraný materiál (aspirát, výplach..)

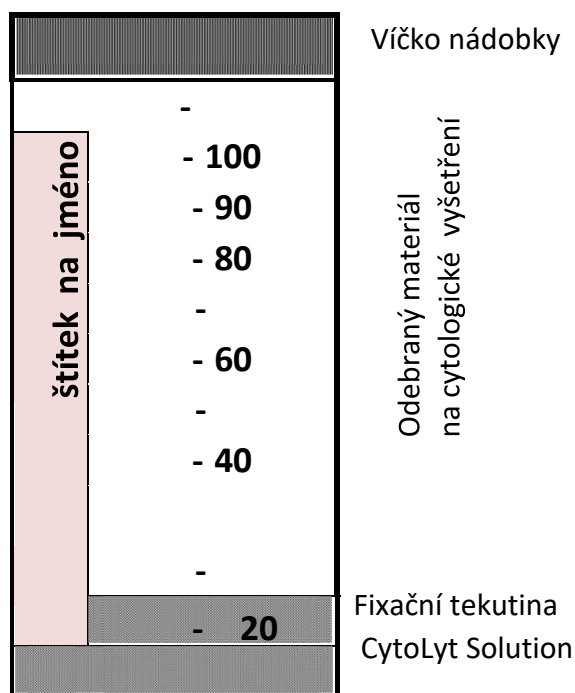

- Nádobka obsahuje 30ml fixační tekutiny CytoLyt Solution
- K této tekutině se přilije odebraný materiál a to do celkového objemu (fixační tekutina + odebraný materiál) maximálně 50ml (dle stupnice na nádobce) - Skladujeme je při pokojové teplotě

Poznámka: množství odebraného materiálu, který se lije do nádoby by měl mít objem maximálně 20ml

Bioptická laboratoř s.r.o.

Mikulášské náměstí 4 | 326 00 Plzeň | IČ: 49197827 | DIČ: CZ49197827
tel.: 373 035 500, 603 83 53 53, 603 84 66 44 | e-mail: biopticka@biopticka.cz

www.biopticka.cz