


Odběr materiálu na cytologické vyšetření do fixace ThinPrep CytoLyt Solution



Používají se originální nádoby s fixační tekutinou CytoLyt Solution.

1. nádobku označíme jménem a příjmením pacienta, event. napíšeme rok narození nebo rodné číslo
2. do takto označené nádoby přilijeme (k fixační tekutině) odebraný materiál (aspirát, výplach..)

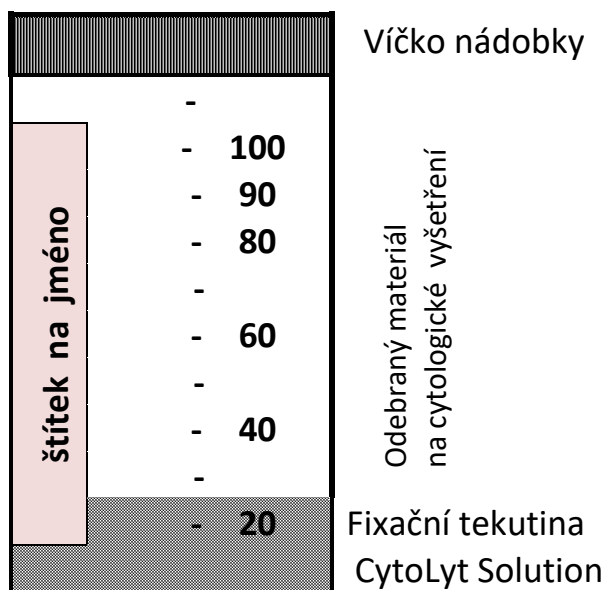

- Nádobka obsahuje 30ml fixační tekutiny CytoLyt Solution
- K této tekutině se přilije odebraný materiál a to do celkového objemu (fixační tekutina + odebraný materiál) maximálně 50ml (dle stupnice na nádobce)
- Skladujeme je při pokojové teplotě

Poznámka: množství odebraného materiálu, který se lije do nádoby by měl mít objem maximálně 20ml