




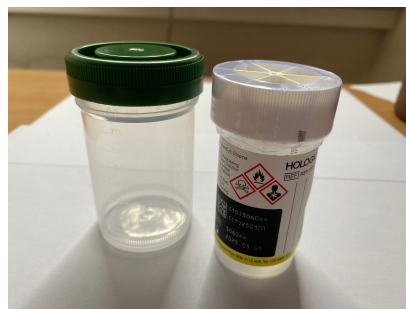


Návod k používání ThinPrep UroCyte

Poznámka: Odběrový (transportní) kelímek má zelené víčko.

Lahvička PreservCyt Solution (s fixační tekutinou) má bílé víčko



	<p>1. Na odběrový kelímek, napište informace o pacientovi a vyplňte průvodku k cytologickému vyšetření moči.</p>
	<p>2. Odeberte moč rutinním způsobem. Celkový objem moči nesmí být vyšší než 40 ml. Pokud je objem moči větší než 40 ml, přebytek slijte. Důrazně doporučujeme k vyšetření zasílat vždy více než 30 ml moči (optimálně 40 ml). Objem nad 30 ml výrazně zvyšuje výskyt suspektních a pozitivních diagnóz z močové cytologie. Naopak, objem pod 20 ml významně redukuje možnost záchytu uroteliálního karcinomu.</p>
	<p>3. Po odběru moči, opatrně nalijte PreservCyt Solution do odběrového kelímku (se zeleným víčkem) obsahujícího moč.</p>
	<p>4. Zelené víčko na odběrovém kelímku pevně uzavřete, aby se zabránilo úniku vzorku.</p>
	<p>5. Umístěte kelímek do sáčku. Sáček těsně uzavřete.</p> <p>6. Skladujte mezi 4°C a 30°C. Preferované je skladování při nižších teplotách, např. v lednici. Vzorek musí být zpracován do 48 hodin, proto prosím nenabírejte vzorek více než jeden den před plánovaným svozem materiálu.</p>