

Odběrová souprava Alinity m Multi-Collect Specimen Collection Kit pro testování DNA patogenů ze stěrů a moči (detekce Chlamydia/Neisseria, STI, vaginitidy, kandidózy, genitální vřed a další)

Popisek odběrové soupravy:

Alinity m multi-Collect Specimen Collection Kit.

Účel použití

Odběrová souprava je určena k odběru a přepravě vzorků mužské a ženské moči, vzorků endocervikálních výtěrů, vzorků vaginálních výtěrů, vzorků orofaryngeálních výtěrů a vzorků rektálních výtěrů pro účely stabilizace nukleové kyseliny z těchto vzorků.

Varování a bezpečnostní opatření

Transportní médium neaplikujte přímo na kůži nebo sliznice, ani ho neužívejte vnitřně. NEVYSTAVUJTE tampon působení transportního pufru před odběrem.

Požadavky na uchování soupravy

Odběrovou soupravu uchovávejte při pokojové teplotě (15 až 30 °C).

Poznámka: Vzorky se musí přepravovat v souladu s příslušnými státními a mezinárodními přepravními předpisy.

Odběr vzorků, manipulace s nimi a transport

1. Odběr vzorku endocervikálního/ vaginálního výtěru

- a. Vyjměte sterilní tampon z obalu a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli špičky tamponu, ani jej nepokládejte na jakýkoliv povrch.
- b. Endocervix: Do endocervikálního kanálu zasouvejte pouze bílou špičku tamponu pro odběr vzorku. Jemně otáčejte tamponem 15 až 30 sekund, aby byl zajištěn odpovídající odběr vzorku. Opatrně vytáhněte tampon.
- c. Vagina: Zasuňte bílou špičku tamponu pro odběr vzorku asi 5 cm do vagíny, aniž byste se dotkli kůže nebo pysku vně vagíny. Jemně otáčejte tamponem 15 až 30 sekund proti stěnám vagíny. Opatrně vytáhněte tampon.
- d. Zacházejte s víčkem a zkumavkou opatrně, aby se předešlo kontaminaci, zejména víčko zkumavky nesmí být zkontaminováno.
- e. Odšroubujte víčko transportní zkumavky a ihned do ní vložte tampon s odebraným vzorkem bílou špičkou dolů.
- f. Opatrně odlomte tampon na rýhované linii tyčinky. Dávejte přitom pozor, aby obsah nevystříkl.
- g. Uzavřete transportní zkumavku víčkem. Ujistěte se, že víčko pevně těsní, aby nedošlo k úniku kapaliny.
- h. Opatřete transportní zkumavku lepicím štítkem s identifikačními údaji vzorku, včetně data odběru.
- i. Po odběru vzorek s tamponem přepravujte a uchovávejte v transportní zkumavce pro výtěry při teplotě 2 až 30 °C, dokud nebude provedeno testování. **Vzorky musí být testovány do 14 dnů od odběru.**

2. Odběr vzorku moči

- a. Vysvětlíte pacientovi, aby odebral první dávku moči (asi 20 až 30 ml na začátku močení) do vhodným způsobem označeného kelímku na sběr moči bez konzervačních látek. Odběr větších objemů moči může způsobit rozředění vzorku, které by mohlo snížit senzitivitu testu.
- b. Odšroubujte víčko transportní zkumavky. Dávejte přitom pozor, aby nedošlo k rozlití obsaženého transportního pufru.
- c. Pomocí plastové převáděcí pipety převedte moč z odběrového kalíšku do transportní zkumavky tak, aby hladina tekutiny dosáhla k průhlednému okénku naplnění na štítku transportní zkumavky. Pokud tomu tak není, je potřeba odebrat nový vzorek. Nepřeplňujte.
- d. Uzavřete transportní zkumavku víčkem. Ujistěte se, že víčko pevně těsní, aby nedošlo k úniku kapaliny.
- e. Opatřete transportní zkumavku lepicím štítkem s identifikačními údaji vzorku, včetně data odběru.
- f. Po odběru vzorek uchovávejte v transportní zkumavce při teplotě 2 až 30 °C, dokud nebude provedeno testování. **Vzorky musí být testovány do 14 dnů od odběru.**

3. Odběr vzorku rektálního výtěru

- a. Vyjměte sterilní tampon z obalu a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli špičky tamponu, ani jej nepokládejte na jakýkoliv povrch.
- b. Bílou špičku tamponu vložte 1-2.5 cm do análního kanálu a alespoň jednou s ní otočte. Opatrně vytáhněte tampon. Vzorky zbarvené stolicí nebo krví jsou přijatelné.
- c. Zacházejte s víčkem a zkumavkou opatrně, aby se předešlo kontaminaci, zejména víčko zkumavky nesmí být zkontaminováno.
- d. Odšroubujte víčko transportní zkumavky a ihned do ní vložte tampon s odebraným vzorkem bílou špičkou dolů.
- e. Opatrně odlomte tampon na rýhované linii tyčinky. Dávejte přitom pozor, aby obsah nevystříkl.
- f. Uzavřete transportní zkumavku víčkem. Ujistěte se, že víčko pevně těsní, aby nedošlo k úniku kapaliny.
- g. Opatřete transportní zkumavku lepicím štítkem s identifikačními údaji vzorku, včetně data odběru.
- h. Po odběru vzorek s tamponem přepravujte a uchovávejte v transportní zkumavce pro výtěry při teplotě 2 až 30 °C, dokud nebude provedeno testování. **Vzorky musí být testovány do 14 dnů od odběru.**

4. Odběr vzorku orofaryngeálního výtěru

- a. Vyjměte sterilní tampon z obalu a dávejte přitom pozor, abyste se nedotkli špičky tamponu, ani jej nepokládejte na jakýkoliv povrch.
- b. Bílou špičkou tamponu otřete obě krční mandle a zadní stěnu a otočte jí alespoň jednou. NEODEBÍREJTE vzorky z jazyka. Pokud je přítomen faryngeální exsudát, odeberte z něj také vzorek.
- c. Zacházejte s víčkem a zkumavkou opatrně, aby se předešlo kontaminaci, zejména víčko zkumavky nesmí být zkontaminováno.
- d. Odšroubujte víčko transportní zkumavky a ihned do ní vložte tampon s odebraným vzorkem bílou špičkou dolů.
- e. Opatrně odlomte tampon na rýhované linii tyčinky. Dávejte přitom pozor, aby obsah nevystříkl.
- f. Uzavřete transportní zkumavku víčkem. Ujistěte se, že víčko pevně těsní, aby nedošlo k úniku kapaliny.
- g. Opatřete transportní zkumavku lepicím štítkem s identifikačními údaji vzorku, včetně data odběru.
- h. Po odběru vzorek s tamponem přepravujte a uchovávejte v transportní zkumavce pro výtěry při teplotě 2 až 30 °C, dokud nebude provedeno testování. **Vzorky musí být testovány do 14 dnů od odběru.**