

Odběrová souprava digene HC2DNA Collection Device (DNA Pap Cervical sampler)

*DNA test hc2 HPV Digene/Qiagene, detekce 13 vysoce rizikových HPV, odlišení HPV typů 16,18,45

Soupravy skladujte při 15 – 30°C.

Nepoužívejte je po uplynutí záruční doby vyznačené na štítku obalu.

Používejte je pouze ve spojení se soupravami Digene Hybrid Capture 2 (hc2 HPV a CT/GC DNA Test).

Vzorky odebrané touto soupravou nemohou být použity pro kultivaci.


Nepoužívejte tento cervikální kartáček u těhotných žen.

Vzorky pro Pap nátěr odeberte před odběrem vzorků na test DNA.

Vzorky na DNA test odeberte před aplikací kyseliny octové nebo jódu.

ODBĚR A MANIPULACE SE VZORKY

Vatovým nebo dakronovým tamponem odstraňte přebytečný hlen z osy cervixu a z okolí ektocervixu.

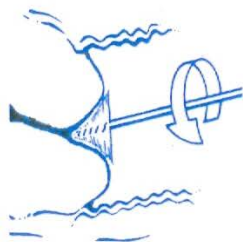

Vnořte kartáček 1 -1,5 cm do osy cervixu tak, aby se zadní štětičky kartáčku dotýkaly ektocervixu. Kartáčkem 3x otočte proti směru hodinových ručiček.

Kartáček do cervikálního kanálu nezasunujte úplně.

Vyjměte kartáček z cervikálního kanálu a vložte jej na dno odběrové zkumavky; kartáček se nesmí dotknout vnějších stěn přepravní zkumavky ani žádného jiného předmětu.

Část tyčinky kartáčku, která vyčnívá ze zkumavky, ohněte o hranu zkumavky a zlomte u vyznačené rýhy. Zkumavku pečlivě uzavřete víčkem.

Řádně ji popište.

Zkumavku odešlete do laboratoře.



Odebrané cervikální vzorky mohou být skladovány při pokojové teplotě po dobu 2 týdnů a mohou být odeslány do laboratoře bez zamražení.

Bioptická laboratoř s.r.o.

Mikulášské náměstí 4 | 326 00 Plzeň | IČ: 49197827 | DIČ: CZ49197827
tel.: 377 320 667, 603 83 53 53, 603 84 66 44 | fax: 377 440 539 | e-mail: biopticka@biopticka.cz

www.biopticka.cz