

## Popis odběrové sady na PIF

Pro odběr materiálu na PIF (přímá imunofluorescence) je dodáván polystyrenový box, který je označen:

- na boční straně razítkem Bioptické laboratoře
- na horní straně obsahem
- na spodní straně víčka je pak uvedena expirace fixačních roztoků (je-li shodná, pak je zde pouze jeden datum), ta je opsána z lahve, ze které je roztok do zkumavek naléván. Pověřený pracovník hlídá dobu expirace. Roztoky používané pro fixaci dodává firma Penta s.r.o.



### *Vysvětlivky popsaných koleček na víčku:*

**PIF** = zkumavka eppendorf s roztokem Pufr Michaels B fixační – pro vyšetření přímé imunofluorescence

**F 10% (dříve také označeno „10“)** = zkumavka šroubovací s roztokem 10%ního formolu – pro histologické vyšetření tkání

Takto lze vzorek uchovávat při pokojové teplotě několik dní (7-14 dní); optimálně však doporučujeme dodat excidovaný materiál v Michelově transportním médiu do naší laboratoře co nejdříve.